

## 新型コロナウイルス抗体検査 採血方法

【準備】 検体パレットを袋から出してください。採血備品の4点（ランセット（針）、消毒綿、スポイト、希釈液）がある事を確認してください。

### 【手順1】

ランセット（針）の**保護キャップ**を取ります  
保護キャップを持って、メインボディを2,3回まわして取り外します。




### 【手順2】

採取する個所をアルコール綿で拭き、清潔にして十分乾かしてから、ランセットをしっかりと採血箇所（指先、手のひら等）に押しあてます。

穿刺ボタンを押すと作動し、穿刺針が出ます。

作動して針が出るまで、ランセットを穿刺部から離さないでください。

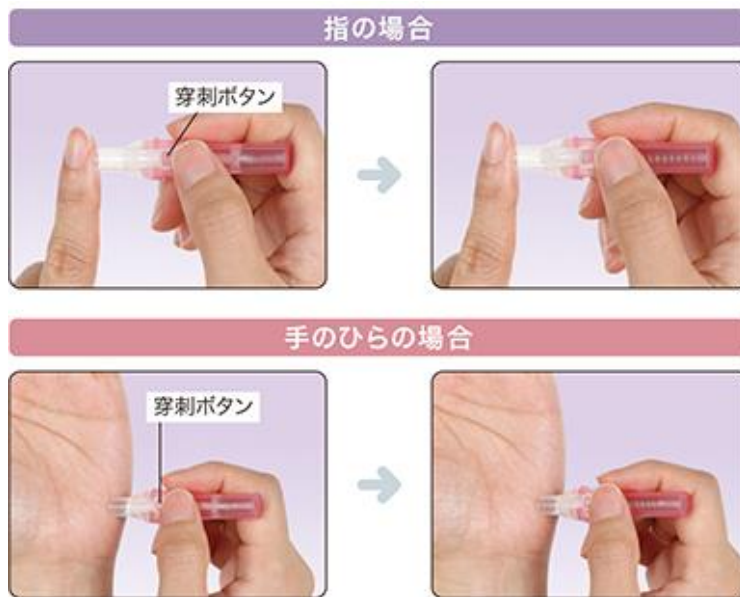

- \* 採血する個所を心臓より低い位置にもってくると、採血しやすくなります。
- \* 指で採血する場合：利き手の反対の中指又は薬指の指先が採血しやすく、またその場合少し指先の下を押すなどして血流をよくすることをおすすめします。

### 【手順3】

血液が出てきたら附属スポイトで吸い取り、検体パレットのAに血液を（目安：2滴/20 $\mu$ l）落とします。その後、時間を空けずに希釈液をBに2滴（/80 $\mu$ l）落としてください。

\*5分ほどしてもパレットに変化がない場合、希釈液を追加してください

\*血液や希釈液が多すぎると全体的にピンクがかり、表示線が見えづらくなりますのでご注意ください。

【手順4】 15分ほどすると、計測結果が表示されます。