


コロナウイルス抗体検査キット 手順

【準備】 検体パレットに加え、以下備品4点がある事を確認してください。

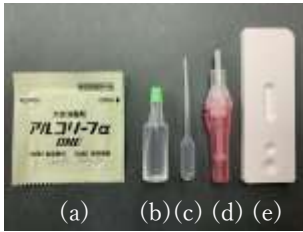

[内容物]


- (a) アルコール消毒綿×20個
- (b) 希釈液×20本 + (大) 1個
- (c) スポイト×20本 + (ガラス管) 20本
- (d) ランセット(針)×20本
- (e) 検体パレット×20枚

【手順1】

ランセット(針)の**保護キャップ**を取ります(右図参照)

保護キャップを持って、メインボディを2、3回まわして取り外します。

*この時、**穿刺ボタン**(黒い四角のボタン)を押さないでください。針が出てしまいます。

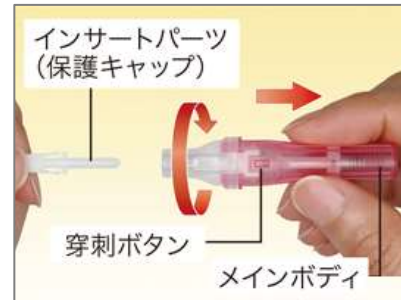

【手順2】

指の場合



採取する個所をアルコール消毒綿で拭き、清潔にして十分乾かしてから、ランセットをしっかりと採血箇所(指先、手のひら等)に押しあてます。

穿刺ボタンを押すと作動し、穿刺針が出ます。

手のひらの場合



※作動して針が出るまで、ランセットを穿刺部から離さないでください。

- * 採血する個所を心臓より低い位置にもってくると血液が集まりやすくなります。
- * 指で採血する場合：利き手の反対の中指又は薬指の指先が採血しやすく、またその場合少し指先の下を押すなどして血流をよくすることをおすすめします。

【手順3】

血液が出てきたら、スポイトで吸い取り、検体パレットの【A】に血液を目安：2滴(20 μ l)落とします。

その後、時間を空けずに希釈液を検査パレットの【B】に2滴(80 μ l)落としてください。

- * 3分ほどしてもパレットに変化がない場合、希釈液を追加してください。
- * 血液や希釈液が多すぎると全体的にピンクがかり、表示線が見えにくくなります。ご注意ください。
- * 血液採取後はアルコール消毒綿で採血箇所をふき取りください。

【手順4】 10~15分ほど経過すると、計測結果が表示されます。※検査結果の書面をご覧ください。

以上で検査終了です。